

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК СЛУЖБЫ

Не определен, зависит от интенсивности использования. Возможность использования ортезов дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортезов без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортезов, Не допускается эксплуатация поврежденных ортезов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации ортеза.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с Бытовым мусором.

Производитель: NEA International BV (NEA Интернешнл БиВи),
Сент Герардсдвер 50, 6224 LV, Маастрихт, Нидерланды.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60.

Арт.: PB-PSB-N4

Ортез на коленную чашечку PSB Patella Brace

Артикул: 84

НАЗНАЧЕНИЕ /ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пателло-феморальный болевой синдром,
- Тендинит сухожилия коленной чашечки.
- Колено прыгуна (apexitis patellae).
- Болезнь Остуд-Шляттера.
- Подвывих проксимального тибιοфибулярного сочленения.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- При надевании ортеза ногу слегка сгибают.
- Полужесткий петлот располагают непосредственно под коленной чашечкой, на коленной связке.
- Ортез закрепить: одной рукой придержать прокладку полужесткого петлота, второй обмотать ленту вокруг ноги и закрепить ортез застежкой «Велкро».

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рекомендуется ношение ортеза при нагрузках во время занятий спортом для предупреждения перерастяжения собственной связки надколенника или бедренно-надколенного сухожилия. Ортез на коленную чашечку помогает уменьшить боль при занятиях спортом за счет перераспределения давления с больных на контактные участки собственной связки надколенной чашечки. Не забывайте: функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза или при расхождении швов. Регулярно контролируйте состояние ортеза PSB patella brace.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Полужесткий петлот спортивного ортеза PSB на коленную чашечку осуществляет местное давление на сухожилие коленной чашечки непосредственно под ней, уменьшая боль. Ортез крепится под коленным суставом. Силиконовые полоски удерживают ортез PSB на коленной чашечке от смещения при активных занятиях спортом.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нам не известны состояния, которые бы ограничивали использование ортеза для коленной чашечки PSB. Боль всегда следует рассматривать как предупреждение. В случае непроходящей боли или иных симптомов, которые не имеют очевидной причины, Вам следует проконсультироваться у лечащего или спортивного врача.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Спортивные ортезы PSB на коленную чашечку производятся в одном универсальном размере.

Ортез на коленный сустав PSB Knee Brace

Артикул: 83

НАЗНАЧЕНИЕ /ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Заболвания и повреждения менисков.
- Профилактика спортивных травм.
- Гипермобильность коленной чашечки.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть все застежки «Велкро».
- Полужесткая вставка-прокладка должна располагаться непосредственно под коленной чашечкой. Это предупреждает сползание ортеза и фиксацию надколенника.
- Затем застегивают эластичную ленту сзади над мышцами голени.
- Затем поднимают и прикрепляют по бокам внешний чехол ортеза. Для этого одновременно двумя руками симметрично натягивают чехол за боковые поверхности и фиксируют застежки «Велкро».
- И, наконец, фиксируют переднюю часть внешнего чехла ортеза.
- Степень компрессии наколенника легко регулировать индивидуально-но, выбирая различные положения застежек «Велкро».

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный спортивный ортез поможет Вам обеспечить необходимую фиксацию колена в случаях растяжений связок коленного сустава, разрывах мениска или повреждения хряща. Симптомы такого повреждения сопровождается скопление жидкости в полости сустава, ограничение нормальной подвижности и болевой синдром. Скопление жидкости в суставе ограничивает движение, что приводит к ощущению неустойчивости (подвижности) сустава. Также может возникнуть блокада коленного сустава. Важно помнить, что даже после полного восстановления коленного сустава сохраняется высокий риск рецидива травмы. Поэтому использование спортивного ортеза на коленный сустав поможет на этапах лечения, реабилитации для профилактики первичных и повторных травм.

Не забывайте: функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза или при расхождении швов. Регулярно контролируйте состояние ортеза PSB knee brace.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Спортивный ортез PSB на коленный сустав оказывает легкое фиксирующее и выраженное компрессионное действие на область коленного сустава, повышая устойчивость к нагрузкам. Дополнительная жесткая вставка-прокладка хорошо фиксирует и поддерживает коленную чашечку снизу. Наружный чехол ортеза позволяет легко регулировать давление вокруг коленного сустава. Для этих целей используются фиксирующие ленты с застежками - липучками «Велкро», расположенные в верхней части ортеза. Расположив жесткую застежку-липучку «Велкро» выше или ниже на мягкую подкладку ортеза, Вы переместите фиксирующую сетку выше или ниже, что приведет к немедленному увеличению или снижению величины давления вокруг колена. Ортез PSB не соскальзывает благодаря надежному креплению вокруг голени с помощью прочной ленты и силиконовых полосок на внутренней части. Фирменный материал Tactel® acquatol для эффективного транспорта влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза. Воздухопроницаемость, однонаправленный транспорт влаги, небольшой объем ортеза обеспечат непревзойденный комфорт ношения при активных занятиях спортом. Ортез быстро и легко надевается без посторонней помощи.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


Противопоказаний к использованию ортеза PSB knee brace на коленный сустав не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза PSB knee brace на коленный сустав для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в голени и стопе. Нам не известны медицинские состояния, которые бы ограничивали использование ортеза для колена. Однако стоит помнить, что хотя бандаж для колена PSB обеспечивает фиксацию сустава, он на самом деле не укрепляет сам коленный сустав. Это означает, что бандаж для колена PSB никоим образом не может заменить функцию связок коленного сустава. В случае непроходящей боли или иных симптомов, которые не имеют очевидной причины, Вам следует проконсультироваться у лечащего или спортивного врача.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность непосредственно под согнутым на 90 градусов коленом (см. рисунок на упаковке). Ортезы PSB на коленный сустав представлены в четырех размерах (см. таблицу размеров на упаковке). Ортезы для левой и правой ноги не различаются.

Чтобы убедиться в правильном подборе размера, рекомендуется примерить ортез.

Правила надевания ортеза Артикул: 84

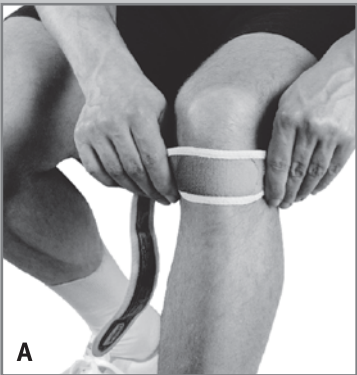

ПРАВИЛА УХОДА

Используйте входящую в комплект сетчатую сумку для стирки. Перед стиркой застегните все застежки-липучки «Велкро». Машинная стирка в щадящем режиме при температуре не выше +40°С. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Высокая температура может разрушить эластичные материалы. По этой же причине не рекомендуется сушка и отжим в стиральной машине или сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Вы сможете продлить срок службы ортеза, если Вы обеспечите ему высушивание в естественных условиях после использования. Никогда не оставляйте ортез влажным в спортивной сумке!

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Фирменный материал Tactel® acquatol для эффективного транспорта влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

S, M, L, XL

Сертификат соответствия №РОСС NL.IM24.802886 от 31.07.2009 г.

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития

РФ РY №ФСЗ 2009/04876 от 27.07.09 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.03.945.Д.010054.08.09 от 26.08.2009 г.



Ортез на руку PSB Arm Brace

Артикул: 93

НАЗНАЧЕНИЕ /ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Латеральные и медиальные эпикондилиты, в т.ч. «локоть теннисиста» и «локоть гольфиста».

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- Ортез закрепить, предварительно продев ленту через специальные кольца.
- Расположить ортез на предплечье до локтевого сустава. В случае «теннисного локтя» полужесткий петлот располагают на внешней стороне руки, а при «руке гольфиста» на внутренней.
- Полужесткий петлот закрепляют на 5 см ниже локтевого сустава.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Располагайте ортез так, чтобы пластмассовое кольцо было на внешней стороне локтевого сустава. Если кольцо расположено на обратной стороне (внутренней), это может вызвать раздражение на внутренней стороне локтевого сустава.

Не забывайте: функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза или при расхождении швов. Регулярно контролируйте состояние ортеза PSB.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Наиболее частыми, хроническими травмами предплечья являются «теннисный локоть» и «локоть гольфиста». «Теннисный локоть» является результатом воспаления разгибающей мышцы запястья, например, из-за длительного напряжения поднятой руки. «Локоть гольфиста» представляет собой аналогичное состояние поражения локтя и возникает при воспалении сгибающей мышцы запястья, например, из-за длительного напряжения опущенной руки. При двух названных состояниях, связанных с растяжением сухожилий мышц-разгибателей или сгибателей, лечение включает прием болеутоляющих средств, реабилитацию и профилактику. При занятиях спортом наиболее удобным является профессиональный спортивный ортез PSB arm brace на предплечье. Он перераспределяет нагрузку с воспаленных сухожилий на мышцы предплечья.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза PSB не выявлено. Важно не затягивать слишком туго ортез, чтобы не препятствовать периферическому кровоснабжению в предплечье и кисти в расслабленном или напряженном состоянии руки. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Спортивные ортезы PSB на предплечье производятся в одном универсальном размере.

Правила надевания ортеза Артикул: 83



ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежку-липучку «Велкро». Машинная стирка в щадящем режиме при температуре не выше +40 С. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Высокая температура может разрушить эластичные материалы. По этой же причине не рекомендуется сушка и отжим в стиральной машине или сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Вы сможете продлить срок службы ортеза, если Вы обеспечите ему высушивание в естественных условиях после ношения. Никогда не оставляйте ортез влажным в спортивной сумке!

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Фирменный материал Tactel® acquatol для эффективного транспорта влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Универсальный

Сертификат соответствия №РОСС NL.IM24.802887 от 31.07.2009 г.

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития

РФ РY №ФСЗ 2009/04856 от 23.07.09 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.03.945.Д.010055.08.09 от 26.08.2009 г.

Правила надевания Ортеза Артикул: 93



Ортез на лучезапстный сустав PSB Wrist Brace

Артикул: 63

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нестабильность лучезапстного сустава.
- Неспецифические болевые синдромы.
- Тендиниты.
- Туннельные синдромы.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- Расстегнуть застежку «Велкро» и продеть эластичную ленту натяжения через специальное кольцо.
- Большой палец кисти необходимо продеть через специальное отверстие в ортезе. После этого крепежное кольцо должно оказаться на тыльной стороне кисти.
- Эластичную ленту натяжения, оборачивают вокруг запястья, затягивают и закрепляют застежкой «Велкро». Давление регулируется усилением или ослаблением ленты натяжения.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ортез PSB позволит зафиксировать лучезапстный сустав в процессе занятий спортом и другими видами деятельности и ослабить хроническую боль, обеспечив «иммобилизацию» сустава при хроническом болевом синдроме на фоне развития нестабильности лучезапстного сустава и тендинитов. Не забывайте: функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза или при расхождении швов. Регулярно контролируйте состояние ортеза PSB wrist brace на лучезапстный сустав.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Спортивный ортез PSB на лучезапстный сустав обеспечивает умеренное ограничение сгибания-разгибания за счет эластичных ребер жесткости, а эластичная лента позволяет регулировать степень компрессии на область сустава. Важным преимуществом является простота надевания, а дизайн и материалы создают особый комфорт, в частности, фирменный материал Tactel® asquator обеспечивает эффективный транспорт влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза. Ортез чрезвычайно удобен и прост для надевания без посторонней помощи.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний не выявлено. В случае непроходящей боли или иных симптомов, которые не имеют очевидной причины, Вам следует проконсультироваться у лечащего или спортивного врача.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность кисти (см. рисунок на упаковке). Ортезы PSB на лучезапстный сустав представлены в трех размерах (см. таблицу размеров) в вариантах для левой и правой кисти. Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен. Если Вы ощущаете давление на кости запястья, возможно, Вам необходим больший размер ортеза.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежку-липучку «Велкро». Машинная стирка в щадящем режиме при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Высокая температура может разрушить эластичные материалы. По этой же причине не рекомендуется сушка и отжим в стиральной машине или сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Вы сможете продлить срок службы ортеза, если Вы обеспечите ему высыхание в естественных условиях после ношения. Никогда не оставляйте ортез влажным в спортивной сумке!

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Фирменный материал Tactel® asquator для эффективного транспорта влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

S, M, L

Сертификат соответствия №РОСС NL.ИМ24.802887 ОТ 31.07.2009 г. Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ РУ №ФСЗ 2009/04856 от 3.07.09 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.03.945.Д.010055.08.09 от 26.08.2009 г.

Правила надевания Артикул: 63



Ортез на большой палец руки PSB Thumb Brace

Артикул: 64

НАЗНАЧЕНИЕ /ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нестабильность первого пястно-фалангового сустава в результате повреждения связок внутренней группы (палец лыжника).

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- Перед надеванием ортеза оба ремня ослабляют. Большой палец продевают сквозь отверстие возле ограничителя, а мизинец через петлю. Ортез закрепляют на тыльной стороне кисти руки.
- Затягивают ремень, проходящий через ладонь, руки, прикрепляя его застежкой «Велкро» со стороны мизинца. Затягивают ремень, проходящий через тыльную часть кисти руки, и закрепляют его застежкой «Велкро». Оба ремня регулируют так, чтобы достигалась хорошая поддержка большого пальца при определенной свободе движений. Ортез ограничивает движение большого пальца вверх и вниз в первом пястно-фаланговом суставе по отношению к горизонтальному положению руки.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В случаях разрывов капсулы первого пястно-фалангового сустава, которое часто возникает вследствие резкого отведения первого пальца кисти кнаружи (такая травма большого пальца часто встречается у лыжников, у вратарей и игроков командных игр с мячом (например в гандболе, волейболе, баскетболе), где подразумевается контакт с мячом, при котором большой палец оказывается за мячом). У большинства людей в результате полученной травмы остаются хронические симптомы: боли, припухлость на внутренней стороне большого пальца, неустойчивость (гиперподвижность) сустава. Боль начинает сопровождать самые простые бытовые хватательные движения кисти: захват столовых приборов, писчих приспособлений и т.п. В этих случаях ортез PSB thumb brace на первый пястно-фаланговый сустав - это простой, эффективный метод обеспечения фиксации как на этапах восстановительного лечения, так и для защиты сустава от получения повторных травм в процессе занятия спортом. Не забывайте: функциональность ортеза снижается при износе отдельных элементов или при расхождении швов. Регулярно контролируйте состояние ортеза PSB thumb brace на первый пястно-фаланговый сустав.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Спортивный ортез PSB обеспечивает эффективную поддержку первого пястно-фалангового сустава в случае нестабильности в результате растяжения суставных связок. Ремни ортеза компенсируют гиперподвижность (нестабильность), вызванную повреждением связок суставной капсулы. Неповрежденные суставы пальца остаются свободными, а крепление ремней производится с учетом нормальной работы кисти. Ортез не стесняет движения в лучезапльном суставе, и кисть остается свободной для выполнения захвата. Благодаря этому ортез PSB является оптимальной поддержкой первого пястно-фалангового сустава при спортивных играх, требующих активного участия кисти (игры с мячом, теннис и других). Ортез удобен и прост для надевания без посторонней помощи. При фиксировании застежек - липучек «Велкро» на тыльной стороне кисти убедитесь, что их концы выровнены, чтобы исключить возможность раздражения кожи, вызванное крючками застежки-липучки.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Спортивный ортез PSB на первый пястно-фаланговый сустав обеспечивает эффективную поддержку в случае нестабильности в результате растяжения суставных связок. Ремни ортеза компенсируют гиперподвижность (нестабильность), вызванную повреждением связок суставной капсулы. Неповрежденные суставы пальца остаются свободными, а крепление ремней производится с учетом нормальной работы кисти. Ортез совершенно не стесняет движения в лучезапльном суставе, кисть остается свободной для выполнения захвата. Благодаря этому ортез PSB на первый пястно-фаланговый сустав является оптимальным для использования при спортивных играх, требующих активного участия кисти (игры с мячом, теннис и других). Ортез чрезвычайно удобен и прост для наложения без посторонней помощи. При фиксировании застежек - липучек «Велкро» на тыльной стороне кисти убедитесь, что их концы выровнены, чтобы исключить возможность раздражения кожи, вызванное крючками застежки-липучки.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Спортивный ортез PSB на первый пястно-фаланговый сустав не обеспечивает полной фиксации и поэтому не пригоден для применения при воспалениях сустава (например, при ревматизме), тендинитах (Кервена) или артрозах данного сустава. В случае непроходящей боли или иных симптомов, которые не имеют очевидной причины, Вам следует проконсультироваться у лечащего или спортивного врача.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность кисти (см. рисунок на упаковке). Ортезы PSB на первый пястно-фаланговый сустав представлены в трех размерах (см. таблицу размеров на упаковке) в вариантах для левой и правой кисти. Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежку-липучку «Велкро». Машинная стирка в щадящем режиме при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Высокая температура может разрушить эластичные материалы, поэтому не рекомендуется сушка и отжим в стиральной машине или сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Вы сможете продлить срок службы ортеза, если Вы обеспечите ему высыхание после использования в естественных условиях. Никогда не оставляйте ортез влажным в спортивной сумке!

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Фирменный материал Tactel asquator для эффективного транспорта влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

S, M, L

Сертификат соответствия №РОСС NL.ИМ24.802887 от 31.07.2009 г. Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ РУ №ФСЗ 2009/04856 от 23.07.09 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.03.945.Д.010055.08.09 от 26.08.2009 г.

Правила надевания Артикул: 64



Ортез на голеностопный сустав PSB Ankle Brace

Артикул: 73

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Абдукционно-инверсионные (супинационные) не костные травмы голеностопного сустава, в т.ч. вторичные.
- Восстановительное лечение после перенесенных абдукционно-инверсионных (супинационных) травм голеностопного сустава.
- Хроническая нестабильность голеностопного сустава.
- Профилактика спортивных травм.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

- Перед надеванием ортеза необходимо расстегнуть все застежки «Велкро».
 - Шина должна располагаться на внутренней стороне лодыжки, сразу за костным выступом.
 - Перед фиксацией лент натяжения убедитесь, что стопа расположена горизонтально и находится в положении 90 градусов по отношению к голени.
 - Порядок натяжения и фиксации лент указан значками с точками. Задняя лента, обозначенная значком , затягивается в первую очередь. Ленту протягивают через заднюю петлю жесткой шины и прочно закрепляют.
 - Аналогичным образом затягивают переднюю ленту, обозначенную . Следует убедиться, что жесткая шина расположена сзади костного выступа внутренней лодыжки! Если при надевании ортеза чувствуется давление на лодыжку, необходимо поправить ленты или продвинуть шину назад в сторону ахиллова сухожилия. После закрепления обеих лент, жесткая шина должна принять вертикальное положение.
 - В последнюю очередь застегивают внешний чехол ортеза. При первом применении ортеза давление под пяткой может ощущаться даже в случае правильного ее закрепления. Опыт показывает, что через некоторое время непривычные ощущения исчезают.
- Для правильной и эффективной работы ортеза необходимо использовать плотно прилегающую спортивную обувь на шнуровке. Ортезы PSB для голеностопного сустава не предназначены для применения с мягкими туфлями или без обуви.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный спортивный ортез PSB ankle brace поможет Вам обеспечить необходимую фиксацию при растяжениях и разрывах связок голеностопного сустава, 40% всех растяжений голеностопного сустава сопровождаются рецидивом. Поэтому ортез PSB поможет Вам на этапах лечения острой травмы, восстановительного периода и для профилактики повторных травм. Не забывайте: функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза или при расхождении швов. Регулярно контролируйте состояние ортеза PSB для голеностопного сустава.

СВОЙСТВА ТОВАРА /ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Уникальным свойством спортивных ортезов PSB для голеностопных суставов является поддержка голеностопного сустава при минимальном объеме материала. Благодаря этому спортивные ортезы PSB легко надеваются внутрь спортивной обуви, даже в сочетании со щитками на голени.

Уникальная ленточная конструкция осуществляет эффективную фиксацию голеностопного сустава при угрозе чрезмерной ротации, которая является причиной большинства травм. Жесткая шина выполнена только на внутренней части голеностопного сустава и под пяткой и служит основой для крепления лент натяжения-фиксации. Дополнительной шины по наружной поверхности голеностопного сустава не требуется, т.к. возможная избыточная ротация в наружном направлении будет ограничена лентами натяжения-фиксации. Комбинация материалов различной плотности и растяжимости позволяет индивидуально регулировать необходимую степень местного давления (компрессии). Силиконовые вставки защищают спортсмена от смещения ортеза в области сустава при активных движениях. Фирменный материал Tactel asquator обеспечивает эффективный транспорт влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза. Воздухопроницаемость, односторонний транспорт влаги, небольшой объем ортеза обеспечат непревзойденный комфорт ношения при активных занятиях спортом.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Спортивный ортез PSB для голеностопного сустава не используются в гимнастике или балете, в сочетании с мягкими туфлями или в отсутствие таковых. Для правильной и эффективной работы ортеза необходимо использовать плотно прилегающую спортивную обувь на шнуровке. Другие обстоятельства, в которых применение спортивного ортеза PSB для голеностопного сустава противопоказано, неизвестны. В случае непроходящей боли или иных симптомов, которые не имеют очевидной причины, Вам следует проконсультироваться у лечащего или спортивного врача.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Сантиметровой лентой измеряется окружность голеностопного сустава: через пятку к подъему стопы (см. рисунок на упаковке). Ортезы PSB на голеностопный сустав представлены в четырех размерах (см. таблицу размеров на упаковке) раздельно для правого и левого голеностопных суставов. Чтобы убедиться в правильном выборе размера, рекомендуется примерить ортез. Для правильного определения размера важно учитывать следующие факторы:

- Ортез должен плотно, но не туго, располагаться над областью голеностопного сустава.
- После надевания ортеза длина лент должна быть достаточной для закрепления застежек-липучек «Велкро». Только полноценное сцепление обеспечит хорошую функциональность ортеза.

- Если размер окружности голеностопного сустава является пограничным значением между двумя размерами, рекомендуется сначала примерить ортезы меньшего размера. Плотное наложение ортеза улучшает эффект поддержки.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой снимите жесткую шину и затем застегните все застежки-липучки «Велкро». Используйте входящую в комплект сетчатую сумку для стирки. Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Высокая температура может разрушить эластичные материалы, поэтому не рекомендуется сушка и отжим в стиральной машине или сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Вы сможете продлить срок службы ортеза, если Вы обеспечите ему высыхание в естественных условиях после ношения. Никогда не оставляйте ортез влажным в спортивной сумке!

СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ

Фирменный материал Tactel asquator для эффективного транспорта влаги (пота) с кожи на поверхность ортеза.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

S, M, L, XL

Сертификат соответствия №РОСС NL.ИМ24.802886 от 31.07.2009 г. Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ РУ №ФСЗ 2009/04876 от 27.07.09 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.03.945.Д.010054.08.09 от 26.08.2009 г.

Правила надевания ортеза Артикул: 73

